

# ZLOŽLJIVA MASAŽNA MIZA



## Uvod

### Sestavljanje in razstavljanje

Zložljiva masažna miza iz nerjavečega jekla, zasnovana posebej za kozmetične salone, tetovatorske studie in masažne centre.

## Uporaba

Primerna za kozmetične tretmaje obraza in telesa, depilacijo ter nego kože.

Primerna za oljne masaže, različne masažne tehnike, aromaterapijo in wellness tretmaje.

Tetoviranje: omogoča udoben položaj tako za tetovatorja kot za stranko med delovnim procesom.

Rehabilitacija: fizioterapevti jo lahko uporabljajo pri izvajanju določenih rehabilitacijskih tehnik.

## Zgradba in funkcija

Namestitev stranke: pomaga stranki ohraniti udoben položaj.

Sistem za nastavitev višine: omogoča optimalno nastavitev višine mize za terapevta in stranko.



Jeklene napenjalne vrvi: zagotavljajo gladko in varno nastavitev višine.

Ročaji za prenašanje: olajšajo premikanje mize.

Nedrseče noge: zagotavljajo stabilnost med uporabo.

## Konstrukcija mize

1. Zgornji del iz umetnega usnja
2. Zadnje noge
3. Sprednje noge
4. Kabelski sistem
5. Zaklepni mehanizem
6. Ročaj
7. Matična pritrditev

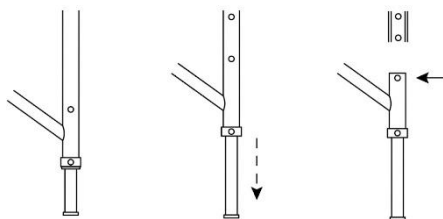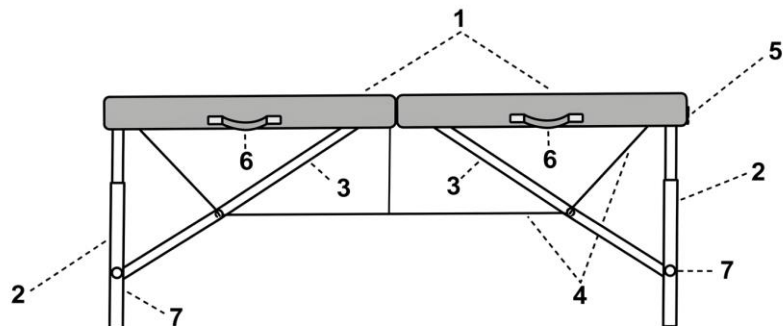

### Nastavitev višine

Pritisnite na zatič za zaklep.

Premaknite nastavljivo nogo v zeleni položaj.

Potisnite ročico navzdol.

## Sestavljanje in razstavljanje

### Postavitev (odpiranje):

Odprite zaklepni mehanizem.

Razširite noge do največje širine in jih pritrdite.

Postavite mizo na stabilno, ravno površino.

Napenjajte kable in pritrdite zaklepe.

Nastavite višino mize na zeleno raven.

## **Zlaganje:**

Začnite pri najnižjem položaju.

Odstranite vse dodatke (če so bili uporabljeni).

Zložite mizo in jo pritrdite z zapiralnim zatičem..

## **Uporaba**

Stabilnost: po vsaki nastavitvi preverite, ali je miza stabilna.

Higiena: po vsaki uporabi temeljito očistite površino.

## **Čiščenje in vzdrževanje:**

Površina mize: redno čistite z vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom; izogibajte se prekomerni vlagi.

Konstrukcija: čistite z vlažno krpo; izogibajte se abrazivnim sredstvom in močnim kemikalijam.

## **Redno vzdrževanje:**

Preverjajte zategnjenost vijakov, spojev in nedersečih čepov.

## **Varnost:**

Največja obremenitev: ne prekoračite največje dovoljene obremenitve, ki jo določa proizvajalec.

Stabilnost: poskrbite, da miza stoji na stabilni površini.

## **Transport in shranjevanje:**

Transport: mizo je treba prevažati v zloženem in varno zaklenjenem stanju.

Skladiščenje: shranjujte jo na suhem mestu, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

---

**Pomembno!** Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na nas.

**Ne pozabite:** redno vzdrževanje in pravilna uporaba zagotavljata dolgo življenjsko dobo izdelka.

---

## **Varnostni ukrepi pri uporabi:**

Izdelek je namenjen uporabi v notranjih prostorih in je zasnovan izključno za uporabo ene osebe.

Nikoli ne prevažajte pacienta na ležalni površini (kot na nosilih).

Ne usedajte se sunkovito in ne skačite na površino.

Mizo prevažajte le, ko so vsi zložljivi zaklepi varno zaprti.

Ne sedite, ne klečite in se ne naslanjajte na naslone za roke.

Pri zlaganju pazite na pravilno razporeditev kablov/vrvi.

Pri zapiranju mize pazite, da ne pripnete kablov.

Mizo uporabljajte in shranjujte stran od ognja in virov toplote.

Pravilna uporaba podaljšuje življenjsko dobo izdelka.

Garancija ne velja za poškodbe, nastale zaradi neupoštevanja navodil.

Vedno uporabljajte mizo v skladu z navodili.

## **Tehnični podatki:**

Dimenzije (v odprtem stanju): 210 cm × 60 cm × 52–73 cm

Teža: 15 kg (± 1 kg)

## **Material:**

Prevleka: umetno usnje

Polnilo: visoko gostotna pena

Konstrukcija: nerjaveče jeklo